

ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。

必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## エスクリニカパック取扱説明書

(エスクリニカパック M, L, WM, WL) 3000

### 1. はじめに

このたびは、セキスイ「エスクリニカパック」をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は、病院、検査センターなどの医療廃棄物処理専用のオートクレーブ処理パックです。  
絶対に他の用途には使用しないでください。  
本製品を安全にご使用いただくためにご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

### 2. 使用方法と注意

#### <使用前の注意>

● ご使用前に破損(破れ、シール不良など)のないことを確認してください。

#### 1) 袋の口を開け、廃棄物を中に入れます。

##### [注意]

- (1) 注射針、メスなど鋭利なものはフィルムを損傷することがありますので  
取り扱いには十分注意してください。
- (2) 内容物の荷重目安は約 10Kg です。入れ過ぎに注意してください。
- (3) エスクリニカパック WM および WL タイプは、二重袋として使用してください。  
2 つの袋に分けて使用しないでください。1 つの袋だけでは破れます。

#### 2) 廃棄物を入れた後、付属の口締めベルトを使い、袋の口が少し開いた状態まで締めます。

##### [注意]

- (1) 口締めベルトは、一度締めるとゆるめることができません。
- (2) オートクレーブ内で蒸気が十分通るように袋の口を必ず少し開けておいてください。  
密閉すると滅菌不良や袋が破裂する原因になります。

#### 3) オートクレーブで滅菌処理をします。

##### [注意]

- (1) 滅菌時には、必ずオートクレーブに付属の専用バスケット(ステンレスカゴ)を  
使用してください。  
専用バスケットを使用しないと、袋が缶体に密着し破れることがあります。
- (2) 滅菌温度は、121℃を目安にしてください。本製品の耐熱温度は 130℃です。
- (3) 滅菌操作は、オートクレーブの取扱説明書に従ってください。

#### 4) 滅菌処理後、専用バスケットの温度が十分に下がったことを確認します。

オートクレーブから袋を取り出し、口締めベルトをしっかり締めて  
医療廃棄物として適切に廃棄処理します。

### 3. 連絡先

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-3-6  
積水マテリアルソリューションズ株式会社  
TEL 03-6744-5786